

# COLORANT

КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ  
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗУБОВ



ARKONA

Подкраска COLORANT - светоотверждаемый текучий композит. Выпускается в цветах.



Показания к применению:

Подкраска COLORANT – предназначена для достижения максимального соответствия цвета реставраций естественной эстетике зуба. Применяется при изготовлении композитных реставраций: пломбы, виниры, вкладки, накладки и ортопедических конструкций: адгезивные мостовидные протезы.

Инструкция применения:

Положить тонкий слой подкраски COLORANT в том месте реставрации где его цвет (опаковость) улучшит эстетический вид. Например, COLORANT используется для увеличения опаковости пришеечной части зуба, для имитации натурального пятна на поверхности зубов, подкрашивания фиссур на окклюзионной поверхности зуба.

При полимеризации толщина слоя подкраски COLORANT не должна превышать 1 мм, время полимеризации - 40 сек.

Подкраску COLORANT можно использовать на поверхности реставрации, хотя наилучший результат достигается путём закрытия слоя подкраски тонким слоем (1-2 мм) композита, используемого для изготовления ортопедической реставрации, например BOSTON.

## Состав

COLORANT – светоотверждаемый, микрогибридный, цветной композит типа „flow”. Это сложный химический материал, состоящий из органической диметакрилатной матрицы (диметакрилат бисфенола А, уретановый диметакрилат, триэтиленгликоль – диметакрилат), содержащей неорганические наполнители (стекло алюмо-боро-силикатное, оксид кремния пирогенный) и дополнительные вещества (фотoinициатор, соинициатор, ингибитор, стабилизаторы, пигменты), отверждаемый вследствие свободнорадикальной полимеризации, активизируемой видимым светом синего цвета (длина волны 400-500 Нм). Минеральные наполнители составляют около 60% по весу.

## Таблица полимеризации:

	Композит COLORANT	зависимость глубины полимеризации (мм) от времени засвечивания	
		20 сек	30 сек
Halogen / LED (500-800 мВт/см <sup>2</sup> )	A,B	1,0 мм	1,5 мм
	C, белый, десневой	-	1,0 мм
LED (>800 мВт/см <sup>2</sup> )	A,B	1,5 мм	2,0 мм
	C, белый, десневой	1,0 мм	1,5 мм

## Противопоказания

Не применять подкраску COLORANT у пациентов, имеющих аллергию на метакрилаты.

## Меры предосторожности

Избегать контакта с кожей, мягкими тканями полости рта и глазами. В случае контакта промыть большим количеством воды. В случае ухудшения самочувствия обратиться к врачу. В случае аллергии на метакрилаты прекратить работу с препаратом. В случае поздней аллергической реакции на метакрилаты – удалить весь слой подкраски.

При попадании препарата в дыхательную систему обратиться к врачу.

## Хранение

Препарат хранить при комнатной температуре (3-28°С). В случае хранения при пониженной температуре, перед повторным использованием необходимо подождать, пока композит не приобретёт комнатную температуру. Во избежание случайной полимеризации упаковку закрывать сразу же после использования препарата.

## Внимание

Препарат предназначен только для использования врачами-стоматологами.

Хранить в недоступном для детей и посторонних лиц месте.

Не перегревать.

Хранить в защищённом от света месте.

Не использовать после окончания срока годности.

## Гарантия

Фирма ARKONA обменивает некачественные стоматологические материалы, приобретённые покупателем или возвращает ему их стоимость. ARKONA не отвечает за ущерб, вызванный неправильным или не соответствующим инструкции применением препарата.

Дата последней актуализации инструкции 17.06.2021



Уполномоченный представитель в РФ:  
ООО «АРКОМ», 191015, Санкт-Петербург,  
ул. Кирочная, д. 64, лит. А, пом. 14Н  
Тел. 8 800 700-25-25, www.arkom-org.com



**ARKONA**  
ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej  
Grzegorz Kalbarczyk, Nasutów 99 C, 21-025 Niemce, Poland  
www.arkonadent.ru